

平成 24 年 7 月

お客様各位

日機装株式会社
メディカル事業本部

停電時の腹膜透析製品のご使用について

平成 24 年 6 月 25 日に、厚生労働省医政局より日本医療機器産業連合会を通じ “計画停電が実施された場合の医療機関等の対応について” の通知（以下、厚生労働省 6/25 付け事務連絡）がありました。今夏の電力需給対策については、節電の協力が呼びかけられておりますが、計画停電は不実施が原則とされています。しかしながら、電力需給の状況が厳しい関西、北海道、四国、九州各電力会社において、計画停電が実施される可能性があり、仮に計画停電が実施された場合、医療機関や在宅で医療機器を使用している患者様の生命・健康に支障が生じないよう、適切に対応することが求められています。

計画停電時の腹膜透析製品の取扱いについて、ご案内いたします。

記

1. CAPD 加温器（ステイセーフ加温器）について

停電中は加温されません。

透析液バッグの温度が低下しますので、加温される時間を考慮の上、ご準備いただきますようお願いいたします。加温時間の目安は、取扱説明書または「停電時の腹膜透析液の加温について」をご参照ください。

2. APD 装置（スリープセーフ APD システム）について

計画停電など、停電の時間をあらかじめご確認いただき、停電が予想される時間帯のご使用は避けていただきますようお願いいたします。

【重要！】

APD 装置使用時に、停電が起きた場合は「日機装 PD コールセンター」にお問い合わせください。電話が不通の場合には、以下の対処方法をご参照ください。

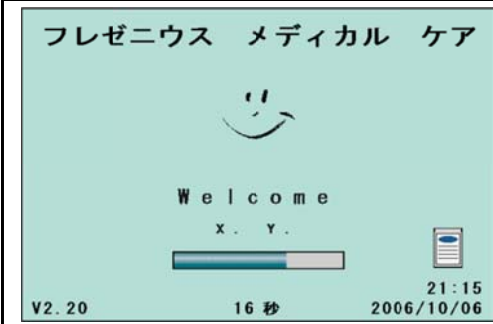

停電発生のタイミングにより、対処方法が異なります。

以下に 4 つのケースをご案内いたします。

(1) “おやすみさない”画面が表示される前に停電した場合



◆ 透析液を接続する前に停電した場合

その状態から再開できます。停電するとすぐにサイクラーの電源が切れます。電源が復帰した際には、以下のような初期画面になります。

	<ol style="list-style-type: none">① スマイリーをタッチします。② セットされているセットプラスは、そのまま使用できますので、通常通りで治療を進めることができます。
---	---

◆ 透析液を接続した後に停電した場合

セットした透析液・回路は使用できません。停電するとすぐにサイクラーの電源が切れます。電源が復帰した際には、以下のような初期画面になります。

	<ol style="list-style-type: none">① スマイリーをタッチします。② セットされている透析液バッグを床に下ろします。③ 通常の治療手順通り、 をタッチします。④ トレーが出てきたら、セットプラスをセットし直して、治療を開始できます。
--	--


(2) “おやすみさない”画面が表示された後に停電した場合

APD 装置は一時停止し、以下の画面が表示されます。



◆ 治療を終了する場合

セットした透析液・回路は再使用できません。


を押すと強制終了に進みます。

治療結果は表示されないため、その後の治療については医療機関にご相談ください。

◆ そのまま待機した場合（バッテリーが消耗する時間はおよそ 20 分です。）

バッテリーが消耗する前に停電が復帰したら、治療を停電発生時の工程から再開することができます。

バッテリーが消耗した場合は、以下の画面が表示されます。

	<p>①安全のため、回路が自動的にシャットダウンし、その後電源が切れます。</p> <p>②通常通り、切り離しを行います。</p> <p>③再起動しても治療結果は表示されません。その後の治療については医療機関の指示に従ってください。</p>
---	--

The screenshot shows a red background with a white progress bar at the top. The progress bar is labeled "0 ml" and "0" at both ends. To the right of the bar is the text "D 320". Below the bar, the text "電圧低下!" (Voltage Drop!) is displayed in large white characters, followed by "バッテリーが空になりました。" (Battery is empty.) and "電源が切れます。" (Power will be cut off.) in smaller white characters.

ご不明な点は、弊社営業担当までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

以上